



Logiciel LAM100

Mode d'emploi

Kustom-software.com

contact@kustom-software.com

Copyright

Aucune partie de ce document ou du logiciel ne peut être reproduite ou transmise sous quelque forme ou par quelque moyen que ce soit, ni traduite dans une langue sans accord préalable écrit de Kustom-Software

Sommaire

Introduction	2
Description.....	2
Pré-requis.....	2
 Utilisation	 3
Paramétrages.....	3
Utilisation quotidienne.....	4
 Licence	 5

Introduction

Le logiciel LAM100 est un logiciel d'aide au comptage leucocytaire.

Il va vous permettre d'établir une formule sanguine avec les cellules de base

Description

Ce logiciel est gratuit

Il permet d'effectuer un comptage à l'aide des touches du clavier de votre poste informatique lors d'une numération manuelle au microscope.

Votre comptage se fait facilement, vous pouvez rester concentrer votre yeux peuvent rester sur le microscope.

Si vous installez le logiciel sur un PC de votre prestataire informatique, renseignez-vous auprès de lui pour la mise en place de ce logiciel et des éventuelles incompatibilités.

Pré-requis

Le logiciel fonctionne sous Windows à partir de Windows 7.

Il utilise le Framework 4.5.1

Utilisation

Cliquez sur le menu « Options » de la page principale ou sur la touche F1

Paramétrage

options

TOUCHES

Choisissez les touches correspondantes

Basophiles

Eosinophiles

Neutrophiles

Lymphocytes

Monocytes

CALCUL

Nombre de cellules à partir duquel, on calcul le pourcentage :


Quitter OK

Indiquez dans les cases correspondantes, les touches que vous souhaitez associer à chaque cellule.

Ce module permet de priser un nombre limite de cellules comptées à partir duquel le pourcentage sera calculé et affiché, permettant ainsi le transfert, l'impression, la mise en attente des résultats.

! Une fois les paramètres choisis, cliquez sur « OK » pour valider les changements

Utilisation
Quotidienne

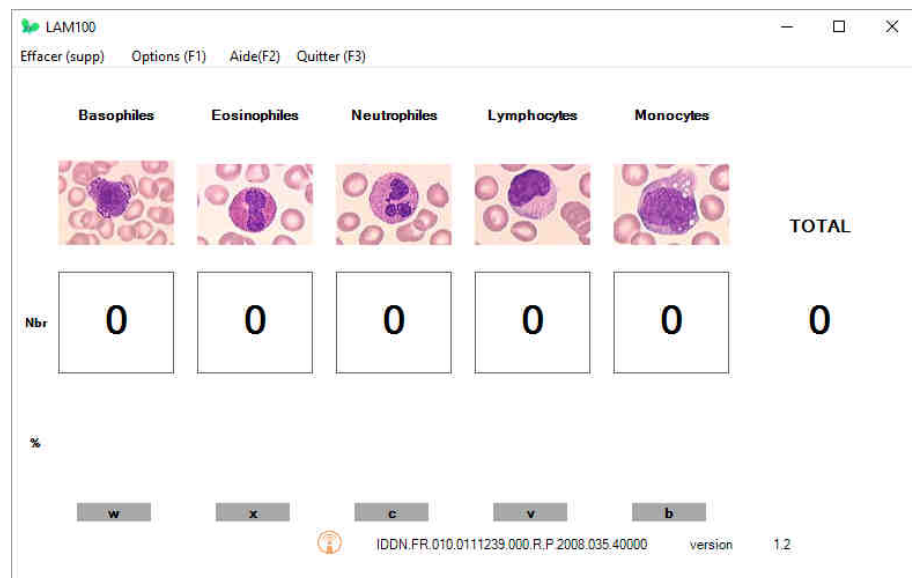

la ligne du bas indique les touches correspondantes aux cellules (voir la section paramétrage pour les modifier).

La première ligne indique le nombre de cellules comptabilisées.

Pour compter, appuyez les touches du clavier correspondant à la cellule trouvée.

Le total s'affiche en temps réel.

Le pourcentage s'affiche lorsque le nombre limite de cellule est atteint (Voir la section paramétrage pour le modifier)

Le résultat peut être effacer à tout moment en cliquant sur le bouton « Sup » ou « Del » du clavier

Licence

LAM100 est déposé à l'IDDN n° **IDDN.FR.010.0111239.000.R.P.2008.035.40000**

Cette licence s'applique à la version enregistrée de LAM100
Cette licence s'applique à la version standard de LAM100 version française
Veuillez lire attentivement les conditions suivantes avant d'utiliser ce logiciel, le simple fait d'utiliser, de distribuer ou d'installer LAM100 entraîne votre acceptation de cette Licence. Soyez certain que vous acceptez les dispositions de ce Contrat.

1- Tous les droits d'auteur de LAM500 appartiennent exclusivement à son auteur - Cécile Rossi

2- Chacun peut utiliser ce logiciel il est distribué gratuitement.

3- Il existe 1 seul type de licence élémentaire délivré LAM100 : Une licence UTILISATEUR pour un ordinateur.

L'enregistrement du logiciel LAM100 ne peut pas être loué mais peut être transféré dans son intégralité, si la personne la recevant accepte les termes de cette licence. Si le logiciel est mis à jour, le transfert doit inclure les mises à jour et toutes les versions précédentes.

4- le programme ne peut pas être vendu

5- Le programme LAM100 est distribué "tel quel". Aucune garantie d'aucune sorte, n'est exprimée ou impliquée. Vous l'utilisez à votre propre risque. L'auteur ne sera pas tenu pour responsable en cas de dommages, de pertes de données, de manque à gagner ou autres genres de pertes lors de l'utilisation ou lors de l'utilisation incorrecte de ce logiciel.

6- Vous ne pouvez pas utiliser, copier, émuler, louer, vendre, modifier, décompiler, désassembler, faire de l'ingénierie inverse, transférer le programme de licence ou n'importe quel sous-ensemble du programme sous licence, à l'exception de ce qui est prévu dans cet accord. Toute utilisation non autorisée entraînera le retrait immédiat et automatique de cette licence voire de poursuites judiciaires.

Le code binaire source LAM100 ne peut être utilisé pour faire de l'ingénierie inverse

Tous les droits expressément accordés ici sont réservés par l'auteur.

7- L'installation et l'utilisation de LAM100 entraînent l'acceptation de tous les termes et conditions présents dans la licence.

Si vous n'êtes pas d'accord avec les termes de cette licence vous devez supprimer les fichiers LAM100 de vos périphériques de stockage et cesser d'utiliser ce produit.

Merci d'utiliser l'original LAM100